



INSTRUCTIVO PARA LA REMISION DE MUESTRA DE HUESO PARA ANALISIS DE ADN

1- Selecciona le pieza a enviar.

Las piezas preferenciales para el envío son dientes, preferentemente molares. En segundo lugar, se prefieren las costillas.
Lo ideal es seleccionar muestras con poca alteración externa (piezas que no se presente resquebrajado o escamado).



2- Eliminar restos de materiales como tierra o cualquier suciedad.

3- Introduzca la muestra en un “Sobre de muestra para análisis de ADN” proporcionado por la institución. Si la muestra a remitir no entrara en dicho sobre, utilizar cualquier sobre de papel o caja.



ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY	
Sobre de muestra para análisis de ADN	
Creador: _____	
Raza: _____	
Rp: _____	
HBU: _____	
Muestra de análisis:	
<input type="checkbox"/> Dientes	
<input type="checkbox"/> Costilla	
<input type="checkbox"/> Hueso de otro tipo	
<input type="checkbox"/> Otro	
Muestra enviada por:	
<input type="checkbox"/> Criador	
<input type="checkbox"/> Otro	
Nombre del propietario: _____	
Calle: _____	
Código Postal: _____	
Municipio: _____	
Departamento: _____	
Teléfono: _____	
E-mail: _____	
Fecha de envío: _____	
Muestra de referencia: _____	
Muestra de control: _____	
Muestra de comparación: _____	

4- Complete los datos del sobre para identificar correctamente la muestra.

Si se utiliza un sobre o caja que no es de ARU, agregar en el sobre o caja utilizado todos los datos que se incluyen en el sobre de ARU: criador, Raza, Rp, HBU, motivo de análisis etc.



5- Cierre el sobre/caja.

Importante:

- No enviar pelos, piel o vísceras de animales muertos.
- En caso de animales que hayan muerto recientemente, se puede evaluar la utilización de otro tipo de muestras (en ese caso consultar al laboratorio).